



# Instrukcja zakładania zatyczek do uszu

## Sposób skutecznej ochrony słuchu przy pomocy zatyczek do uszu

### Noszenie

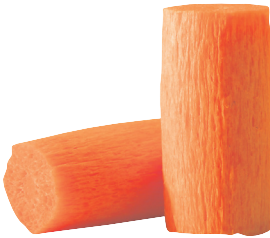


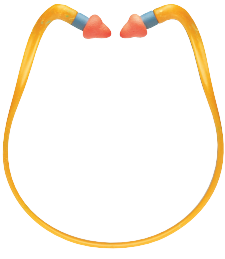
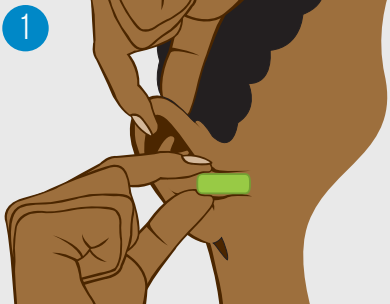
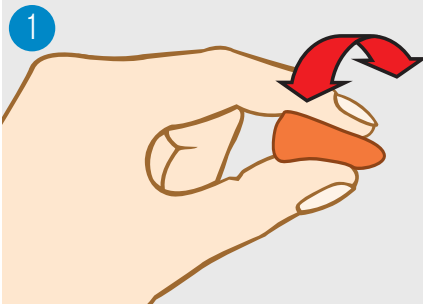
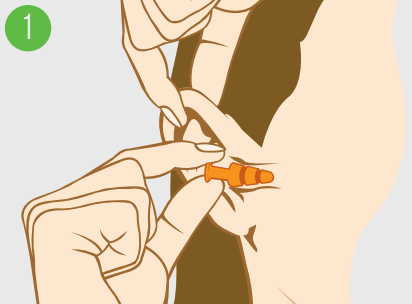
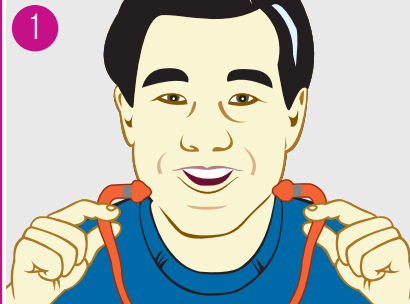
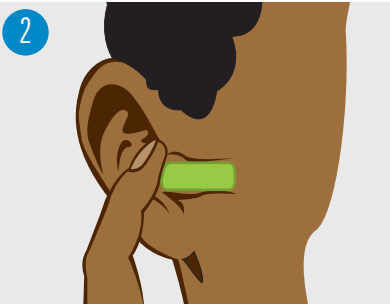
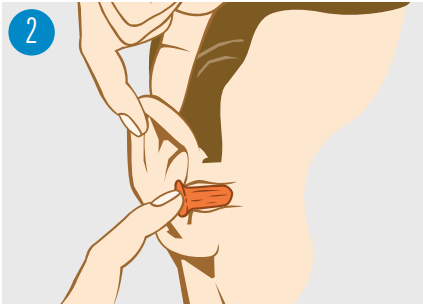
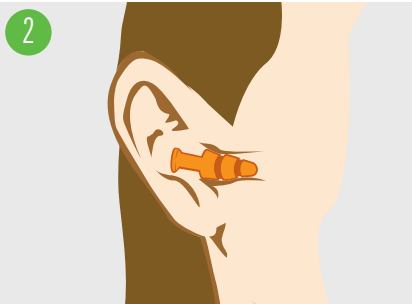
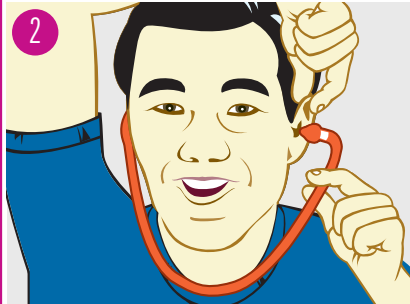
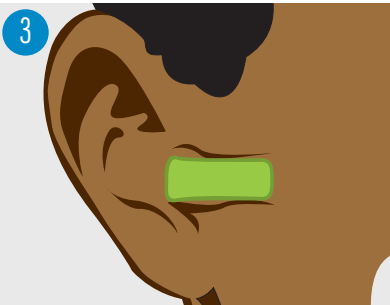
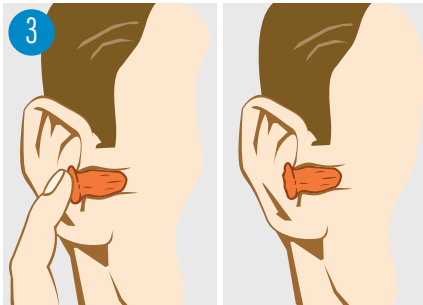
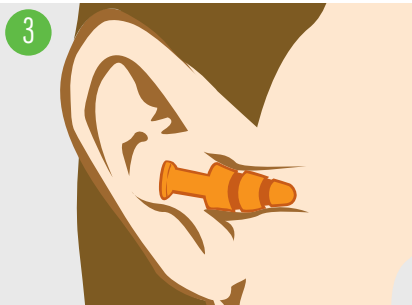
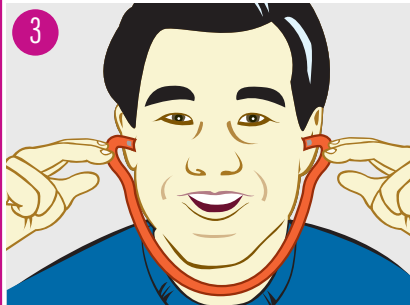
- Należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją zakładania zatyczek do uszu

### Wybór

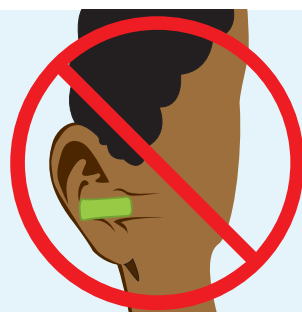
- Unikać nadmiernej ochrony w otoczeniu o minimalnym natężeniu hałasu – dobierając najlepsze zatyczki do danej sytuacji należy uwzględnić poziom hałasu i potrzebę komunikacji ze współpracownikami lub słyszenia sygnałów ostrzegawczych podczas wykonywania pracy

### Zalecenia

- Przed założeniem zatyczek jednorazowego użytku należy sprawdzić, czy nie są zabrudzone, uszkodzone lub stwardniałe – jeżeli tak, należy je natychmiast wyrzucić
- Celem zachowania higieny, zatyczki do uszu jednorazowego użytku należy wyrzucić po wykorzystaniu
- Przy prawidłowym użytkowaniu zatyczki do uszu wielokrotnego użytku można stosować przez 2-4 tygodnie; należy je czyścić wodą z mydłem i przechowywać w pojemniku, gdy nie są używane
- W przypadku zatyczek do uszu na pałku należy regularnie czyścić i zmieniać wymienne końcówki

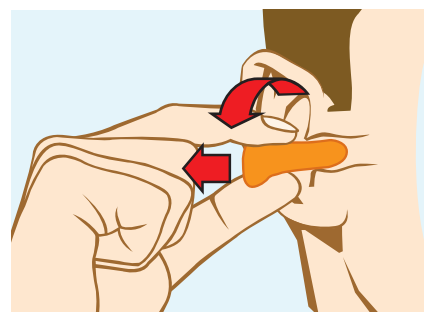
Zatyczki nierolowane	Zatyczki rolowane	Zatyczki wielokrotnego użytku	Zatyczki na pałku
 <p>Matrix™</p>	 <p>Max®</p>	 <p>SmartFit®</p>	 <p>QB2HYG®</p>
<p>1</p>  <p>Sięgnij nad głowę wolną ręką, podciągnij ucho do góry i włóż zatyczkę głęboko do kanałika ucha.</p>	<p>1</p>  <p>Czystymi rękami ściśnij i zroluj całą zatyczkę.</p>	<p>1</p>  <p>Przytrzymując rdzeń, sięgnij ręką nad głowę i delikatnie pociągnij górną część ucha do góry.</p>	<p>1</p>  <p>Umieść pałkę pod brodą jak na powyższym rysunku. Wciśnij rękami wkładki głęboko do wnętrza kanałików uszu ruchem skierowanym do wewnątrz.</p>
<p>2</p>  <p>Zatyczki do uszu należy wkładać zgodnie z rysunkiem. Przerazić popychać zatyczkę, gdy palec dotknie ucha</p>	<p>2</p>  <p>Sięgnij nad głowę wolną ręką, podciągnij ucho do góry i włóż zatyczkę głęboko do kanałika.</p>	<p>2</p>  <p>Włóż zatyczkę tak, aby wszystkie pierścienie były dobrze osadzone wewnątrz kanałika ucha.</p>	<p>2</p>  <p>Poziom ochronę można zwiększyć pociągając ucho w górę i z powrotem, aby lepiej umocować zatyczki, tak jak pokazano na rysunku.</p>
<p>3</p>  <p>Po prawidłowym założeniu końcówki zatyczek nie powinny być widoczne dla osoby patrzącej od przodu na użytkownika zatyczek.</p>	<p>3</p>  <p>Przytrzymaj przez 30 - 40 sekund, aż zatyczka całkowicie rozpreży się w kanałiku ucha. Po prawidłowym założeniu końcówki zatyczek nie powinny być widoczne dla osoby patrzącej od przodu na użytkownika zatyczek.</p>	<p>3</p>  <p>Po prawidłowym założeniu końcówka rdzenia zatyczki może być widoczna dla osoby patrzącej od przodu użytkownika zatyczek.</p>	<p>3</p>  <p>W środowisku o dużym natężeniu hałasu należy lekko dociśnąć pałkę do wnętrza końcówkami palców, tak jak pokazano na rysunku.</p>

## Zalecenia dotyczące zatyczek do uszu Howard Leight®



### Prawidłowe dopasowanie

Jeżeli wydaje się, że jedna lub obie zatyczki nie są prawidłowo dopasowane, należy je wyjąć i ponownie założyć.



### Wymywanie

Delikatnie obrócić zatyczkę, jednocześnie powoli wyciągając ją na zewnątrz ucha.



### Kontrola akustyczna

W środowisku o dużym natężeniu hałasu, z założonymi zatyczkami do uszu, zasłoni uszy rękami i odstoń. Zatyczki powinny zablokować dźwięki w wystarczającym stopniu, aby zakrycie uszu rękami nie dawało znaczącej różnicy poziomu hałasu.

Bacou-Daloz Polska  
Ul. Podskale 2, 30-522 Kraków, Polska  
Tel +48 012 656 57 31  
Fax +48 012 656 14 54  
biuro@bacou-daloz.com

HOWARD  
LEIGHT

**PRZEZNACZENIE I ODPowiedzialność:** Istotną rolę w ochronie słuchu odgrywa odpowiednie dobrane i jakościowe zatyczki do uszu. Należy używać zatyczek do uszu zgodnie z instrukcją. Należy pamiętać, że zatyczki do uszu nie są urządzeniami medycznymi. Należy pamiętać, że zatyczki do uszu nie należy używać do celów innych niż ochrona słuchu. Należy pamiętać, że zatyczki do uszu nie należy używać do celów innych niż ochrona słuchu.

**OSTRZEŻENIE:** Niektóre zatyczki do uszu zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Należy pamiętać, że zatyczki do uszu nie należy używać do celów innych niż ochrona słuchu. Należy pamiętać, że zatyczki do uszu nie należy używać do celów innych niż ochrona słuchu.